

GIO-351

innoGIO



GIOmum Line Simple

Elektrická odsávačka materského mlieka

Návod na použitie

Ďakujeme, že ste si zakúpili odsávačku GIOmumLine Simple, ktorá ponúka príjemný a diskrétny spôsob odsávania materského mlieka. GIOmumLine Simple bola navrhnutá tak, aby ste ju mohli používať kedykoľvek a kdekoľvek. Je malá, ľahká a ľahko prenosná.


- elegantný a kompaktný dizajn
- tichá a pohodlná prevádzka
- jednoduché používanie
- účinná extrakcia mlieka
- ideálna na použitie doma alebo v kancelárii
- jednoduchá montáž a čistenie

GIOMumLine Simple je vysoko kvalitný uzavretý systém. Všetky časti, ktoré prichádzajú do kontaktu s materským mliekom, neobsahujú BPA, BPS, ftaláty a PVC. Umožňuje rýchlo a efektívne odsávať materské mlieko podľa vašich potrieb. Montáž je jednoduchá; všetky časti sa dajú rozobrať na jednoduché čistenie a sterilizáciu vo vriacej vode.


Dôležité upozornenie

- Pred zostavením dielov používaných na odsávanie mlieka si umyte ruky jemnou mydlovou vodou a dôkladne ich osušte.
- Pred každým použitím sa uistite, že sú všetky časti odsávačky mlieka čisté a suché.
- Tento výrobok podlieha osobnej starostlivosti a nemal by sa deliť medzi matkami.
- Ak pri používaní pociťujete bolesť, vyhľadajte odbornú radu laktačného poradcu, aby ste sa uistili, že používate správnu veľkosť prsného košíčka.
- Ak sa vám nedarí mlieko odsávať, nepokračujte v odsávaní dlhšie ako päť minút.
- Pred vybratím odsávačky mlieka z prsníka ju vypnite.
- Vyhnite sa drsným čistiacim prostriedkom a tvrdým handričkám alebo hubkám, pretože môžu výrobok poškriabať a poškodiť.
- Používanie UV sterilizátorov sa neodporúča, pretože silikónové diely zožltnú a skrátia svoju životnosť alebo sa poškodia.
- Na čistenie ventilu nepoužívajte žiadnu čistiacu kefku, mohlo by dôjsť k jeho poškodeniu.
- Aby ste zaistili dobré sanie, ventil vymeňte po každom mesiaci používania alebo skôr, ak spozorujete známky opotrebovania alebo poškodenia.
- Všetky ostatné časti odsávačky mlieka vymeňte pri známkach opotrebovania alebo slabosti alebo po 3 mesiacoch používania.
- Diely skladujte na chladnom a suchom mieste a nevystavujte ich priamemu slnečnému žiareniu.
- Sací motor a/alebo nabíjací kábel nečistite ani neponárajte do vody.
- Na nabíjanie batérie používajte iba nabíjačku 5V / 1-3A s káblom USB-C.
- Prístroj nenabíjajte dlhšie ako 24 hodín, pretože by mohlo dôjsť k jeho trvalému poškodeniu alebo ohrozeniu bezpečnosti.
- Uchovávajte mimo dosahu detí. Tento výrobok obsahuje malé časti, ktoré môžu predstavovať nebezpečenstvo udusenía.

POPIS DIELOV

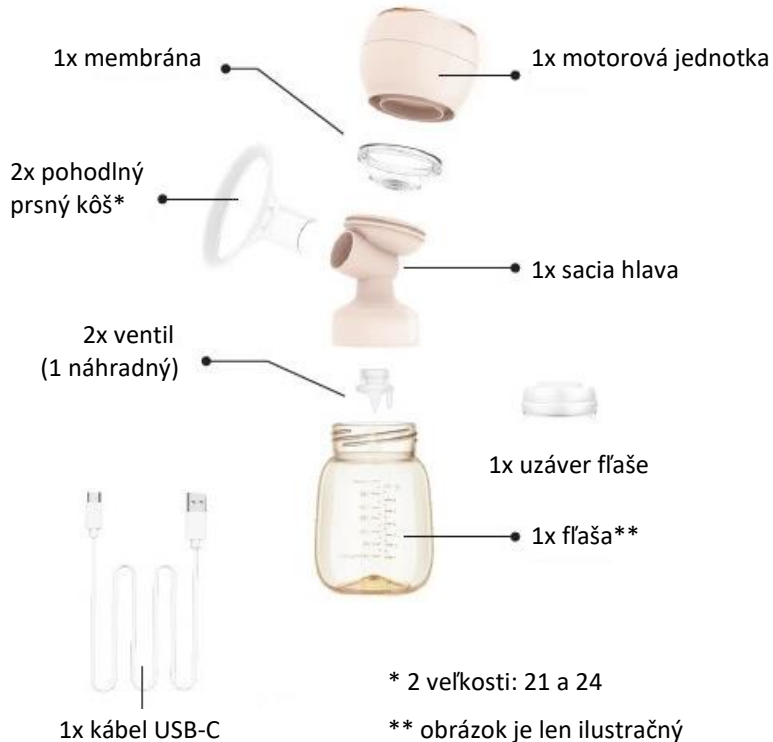

DISPLAY

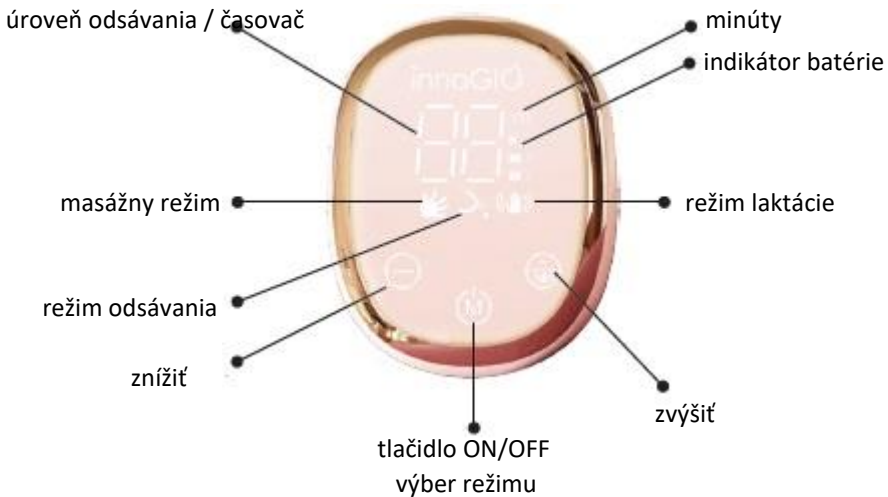

STAV BATÉRIE



batéria je plne nabitá



batéria je nabitá približne na 30-60 %



nízka úroveň nabitia

blikanie



batéria je vybitá, pred použitím čerpadlo nabite

Dôležité: Nenabíjajte odsávačku mlieka dlhšie ako 24 hodín - mohlo by dôjsť k poškodeniu zariadenia.

NABÍJANIE

Ak chcete prísavku nabíjať a zabrániť poškodeniu batérie, pripojte kábel USB-C k nabíjačke s napätím iba 5 V a prúdom od 1 A do 3 A (5 V/1 A, 5 B/2 A, 5 V/3 A). Na nabíjanie možno použiť väčšinu bežných nabíjačiek telefónov, tabletov a power bánk.

Ak je to potrebné, po vypnutí motorovej jednotky a odpojení nabíjačky zo zásuvky utrite motorovú jednotku alebo nabíjačku mäkkou vlhkou handričkou. Motorovú jednotku alebo nabíjačku neponárajte do vody alebo dezinfekčného prostriedku. Pred prvým použitím a po každom použití vyčistite a sterilizujte všetky ostatné časti odsávačky mlieka, ktoré prichádzajú do kontaktu s materským mliekom.

ÚDRŽBA A ČISTENIE

1. Pred prvým použitím

- Odstráňte všetky časti a umyte ich v teplej mydlovej vode.
- Dôkladne ich opláchnite.
- Ponorte diely (okrem motorovej jednotky a kábla) do hrnca s vodou a varte 3-5 minút.
- Použite veľký hrniec, aby sa časti nedotýkali stien alebo dna hrnca.
- Prebytočnú vodu opláchnite a nechajte uschnúť na stojane alebo čistej utierke.

2. Po každom použití

- Odstráňte všetky časti (membránu, základňu ventilu, ventil, košík na prsia a fľašu). Odstráňte časti, ktoré neprichádzajú do kontaktu s materským mliekom (motorová jednotka, nabíjačka).
- Čo najskôr po použití opláchnite časti studenou vodou, aby ste odstránili materské mlieko.
- Umyte ich v teplej mydlovej vode. Ventily môžete čistiť jemným trením medzi prstami.
- Dobré ich opláchnite.
- Prebytočnú vodu opláchnite a nechajte uschnúť na stojane alebo čistej utierke.

3. Ako sterilizovať

- Postupujte podľa pokynov na čistenie v bode 2.
- Ponorte ich do hrnca s vodou a varte 3-5 minút.
- Použite veľký hrniec, aby sa časti nedotýkali stien alebo dna hrnca.
- Prebytočnú vodu opláchnite a nechajte uschnúť na stojane alebo čistej utierke.



Dôležité: Ventily sú veľmi jemné a môžu sa ľahko poškodiť. Z tohto dôvodu do nich nevkładajte žiadne čistiace kefkы. Zaobchádzajte s nimi opatrne a často ich vymieňajte.

Ako zmerať a zistiť veľkosť prsného koša

Zatlačte bradavku tak, aby sa postavila, a zmerajte priemer (alebo šírku) jej základne. Nezahŕňajte areolu.

Dobre padnúci prsný košíček je dôležitý pre pohodlie a bezpečnosť, ako aj pre účinnosť odsávania. Odporúčaná veľkosť na začiatok je približne o 3 - 4 mm väčšia ako priemer základne bradavky. Ďalším faktorom je to, ako sa cítite a či pri odsávaní pociťujete nepohodlie alebo bolesť.

Do prsného košíka by sa mala vťahovať len bradavka, nie areola.


Ak sa bradavka pri odsávaní mlieka trie o boky tunela prsného košíka, je pravdepodobne príliš malá. Ak sa vám areola vtiahne do tunela prsného košíka, použite väčšiu veľkosť košíka.

Ak máte obavy alebo pochybnosti, je dôležité požiadať o radu laktačného poradcu.



Pred odsávaním zmerajte bradavku.

Ak ste merali bradavku počas tehotenstva, je dôležité ju pred odsávaním znovu zmerať, pretože veľkosť vášho bradavky sa môžu po pôrode mierne zmeniť.

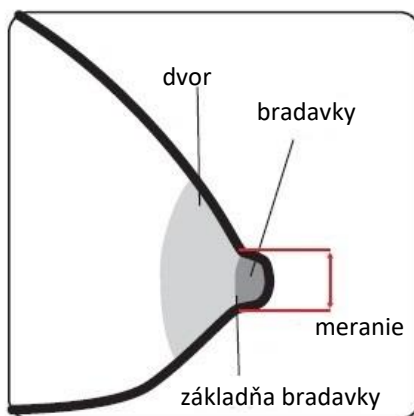

Veľkosť bradavky	Veľkosť prsného košíčka
do 17 mm	21
do 20 mm	24
do 23 mm	27
do 26 mm	30
do 32 mm	36

NÁVOD NA POUŽITIE

Príprava

1. Umyte si ruky jemnou mydlovou vodou a dôkladne ich osušte, aby ste predišli kontaminácii mlieka.



2. Vložte prsný košík do hlavy odsávačky. Podľa vyššie uvedeného postupu zistite vhodnú veľkosť prsných košíčkov.

3. Do spodnej časti základnej hlavy opatrne vložte ventil.



4. Hlavu zaskrutkujte v smere hodinových ručičiek rukoväťe na fľaši.

5. Vložte silikónovú membránu zhora do nasávacej hlavy. Uistite sa, že je membrána správne a rovnomerne nasadená.




Uistite sa, že je membrána úplne suchá, aby sa zabránilo poškodeniu motorovej jednotky.





6. Pripevnite motorovú jednotku k základni stlačením membrány.

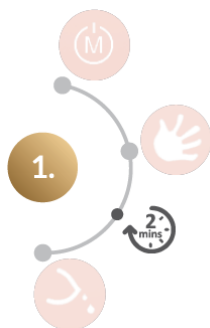

POUŽÍVANIE




1. Dlhým stlačením  zapnete odsávačku mlieka. Masážny režim sa spustí na 2 minúty a potom sa automaticky prepne do režimu odsávania. Ak sa vám mlieko spustí skôr, môžete manuálne prepnúť na režim odsávania stlačením tlačidla .

Stláčaním tlačidiel +/- vyberte úroveň, ktorá vám najviac vyhovuje.

Každý režim má 10 úrovní (od 0 do 9).



3. Stlačením tlačidla  vyberte zmiešaný režim: rozsvietia sa indikátory masážneho aj odsávacieho režimu.

Zmiešaný režim prepína medzi masážnym režimom a režimom odsávania.

Zmiešaný režim

Úroveň	Schéma zmiešaného režimu (Poznámka: V zmiešanom režime zostanú príslušné úrovne oboch režimov na predtým zvolenej úrovni)
0	1x masáž, 1x odsávanie (opakovanie)
1	2x masáž, 1x odsávanie (opakovanie)
2	3x masáž, 1x odsávanie (opakovanie)
3	4x masáž, 1x odsávanie (opakovanie)
4	5x masáž, 1x odsávanie (opakovanie)
5	6x masáž, 1x odsávanie (opakovanie)
6	7x masáž, 1x odsávanie (opakovanie)
7	8x masáž, 1x odsávanie (opakovanie)
8	9x masáž, 1x odsávanie (opakovanie)
9	10x masáž, 1x odsávanie (opakovanie)

Odsávačka mlieka sa automaticky vypne po 30 minútach. Odporúča sa odsávať maximálne 30 minút.

Laktačná masáž

Keď je odsávačka vypnutá, dlhým stlačením  sa aktivuje laktačná masáž.

Krátkym stlačením vyberte preferovaný masážny režim - AU alebo P+L (osobný vibračný režim a nastavenie úrovne).

AU = automatická masáž, úroveň je prednastavená

P = vibračný režim

P0-P2 = krátke vibrácie

P3-P5 = krátke a dlhé vibrácie (zmiešaný cyklus)

P6-P9 = vysoké vibrácie


L0-L9 = úroveň vibrácií

Sila vibrácií sa zvyšuje s vyššími úrovňami.

Odsávanie s režimom laktačnej masáže

Počas odsávania dlhým stlačením  zapnete alebo vypnete masážny režim.



 **Poznámka:** Funkciu laktačnej masáže nemôžete zmeniť počas odsávania; je možné ho len zapnúť alebo vypnúť.

Motorovú jednotku je možné vybrať a používať ako masážny prístroj na dojčenie. Môžete ju použiť aj na zmiernenie zahlienenia, mastitídy, upchatých kanálikov a na zlepšenie toku mlieka.




MOŽNÉ PROBLÉMY A RIEŠENIA

Problém	Riešenie
Neefektívna extrakcia	<ul style="list-style-type: none">- Skontrolujte polohu ventilu a jeho správne upevnenie.- Skontrolujte stav ventilu a ak je opotrebovaný, vymeňte ho.- Nainštalujte dodané náhradné ventily, ak ešte neboli použité.- Pozrite si odporúčania pre výber veľkosti prsných košíčkov.
Bolesť bradavky/areoly	<ul style="list-style-type: none">- Pozrite si odporúčania pre výber veľkosti prsných košíčkov.- Poradte sa s laktačným poradcom.- Balzam na bradavky sa môže použiť na zotavenie.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Vstup: 100-240 V - 50/60 Hz

Výstup: 5 V 1A 

Lítiová batéria: 3,7 V 1800 mAH

Sacia sila: 38 - 270 mmHg

Automatické vypnutie: po 30 minútach

Prevádzkové podmienky: 10-30 °C, relatívna vlhkosť 15-93 %, 70-106 kPa

Podmienky skladovania: -25-50 °C, relatívna vlhkosť 15-93 %, 70-106 kPa

Ďakujeme, že ste si zakúpili výrobok InnoGIO!

Aby ste mohli výrobok dobre a dlho používať, pozorne si prečítajte tento návod na použitie a uschovajte si ho pre budúce použitie.

Obrázky slúžia len na ilustračné účely.

innoGIO

Importer: **INNOGIO** sp. z o.o.
Ostródzka street 74H, 03-289 Warsaw, Poland
www.innogio.com



@innoGIO.official



@innogio_com

